

Akutol spray, zaščitno pršilo

Akutol zaščitni sprej se uporablja za hitro oskrbo ran in manjših površinskih poškodb. Uporaba: rano sperite z vodo od sredine rane navzven in jo razkužite. Razpršilo pretresite, nanesite z razdalje 15-20 cm od površine rane in pustite 3 minute, da se posuši. Sloj se sam odstrani v 2-3 dneh. Ponovno nanašanje po 2-3 dneh. Za vse starostne skupine, za otroke od 3. leta starosti naprej ter za diabetike. Lahko se uporablja med nosečnostjo in dojenjem, vendar ne na velikih površinah. Ne uporabljajte na globokih, umazanih, okuženih ranah, pri obsežnih krvavitvah, ter v primeru alergije na katero od sestavin izdelka. Priporoča se nanos enega sloja; nanos več kot 3 sloje lahko upočasni proces celjenja Opozorilo: Izjemno vnetljiv aerosol. Pri visoki temperaturi se lahko razpoči, ne izpostavljate nad 50 °C. Zaščititi pred toploto, vročimi površinami, iskrami, odprtim ognjem in drugimi viri vžiga. Ne prebadajte ali ne sežigajte, niti po uporabi. Hraniti izven dosega otrok. Embalažo odstranite v zbiralniku za nevarne odpadke. Pri uporabi ne jejte, ne pijte, ne kadite. Zaščitite oči in ne vdihujte pršila. Sestava: Denaturiran etanol, dimetileter, akrilatni kopolimer, dioksacikloperntan. Rok uporabnosti: 3 leta - do datuma, navedenega na dnu posode. Proizvajalec: AVEFLOR, d.o.o., Budčeves 26, 507 32 Kopydln, Češka, Uvoznik in distributer: AstraVita d.o.o., LJUBLJANA, www.astra-vita.eu, info@astra-vita.eu. Datum izdaje: 1.11.2023