

## **Akutol stop spray**

Akutol Stop sprej se uporablja za zaustavitev krvavitve manjših površinskih ran. Sprej ustvari oblogo, ki se strdi, ter tvori hidrogel. Hidrogel ščiti rano, pomiri poškodovano območje, ter spodbuja celjenje. Za vse starostne skupine, za otroke od 3. leta starosti naprej ter za diabetike. Uporaba: območje očistite, nato izdelek dobro pretresite. Sprej nanesite z razdalje 15-20 cm. Nanesite na celotno površino poškodovanega mesta in pustite, da se posuši. Ni namenjen za močne krvavitve, globoke ali okužene rane, ter opekline. Ne uporabljajte na obrazu (izogibajte se stiku z očmi), ni namenjen za zdravljenje sluznic. Ne uporabljajte, če ste alergični na katero od sestavin izdelka. Uporaba pri nosečnicah in doječih ženskah naj bo po posvetu z zdravnikom. Opozorilo: ne uporabljajte v bližini ognja. Zaščitite oči pred pršenjem in ga ne vdihavajte. Izjemno vnetljiv aerosol. Pri visoki temperaturi se lahko razpoči, ne izpostavljate nad 50 °C. Zaščititi pred toploto, vročimi površinami, iskrami, odprtim ognjem in drugimi viri vžiga. Ne prebadajte ali ne sežigajte, niti po uporabi. Hraniti izven dosega otrok. Med nanosom ne jejte, ne pijte, ne kadite. Embalažo odstranite v zbiralniku za nevarne odpadke. Shranjujte pri temperaturah med 5-25 °C. Porabite najkasneje do datuma, navedenega na dnu. Sestava: metilal, butan, alginat, propan, kalcijev alginat, stearalkonijev hektorit, denaturirani alkohol, izobutan, PPG-2 metil eter, olje jojobe, ekstrakt plodov sibirske ogrščice, ekstrakt lista aloe vera, ekstrakt cveta ognjiča, ekstrakt cveta kamilice, mentol. Proizvajalec: AVEFLOR, d.o.o., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Češka, Uvoznik in distributer: AstraVita d.o.o., LJUBLJANA, [www.astra-vita.eu](http://www.astra-vita.eu), [info@astra-vita.eu](mailto:info@astra-vita.eu). Datum izdaje: 1.11.2023