

Akutol Plaster remover

Uporablja se za enostavno odstranjevanje obližev, lepilnih povojev ter drugih medicinskih pripomočkov, pritrjenih na površino telesa (nikotinski obliži, EKG elektrode, igle, kineziološki trakovi itd.). Je varen in nežen do kože. Ne vpliva na proces celjenja rane in rana ga ne more absorbirati. Namenjen je tako domači kot profesionalni uporabi. Ne uporabljajte v primeru alergije na katerokoli od sestavin. Za vse starostne skupine, tudi za dojenčke in novorojenčke, ter diabetike. Uporabo pri nosečnicah in doječih ženskah po navodilu zdravnika. Uporaba: koža okoli obliža naj bo čista in suha. Pršilo razpršite na obliž z razdalje 10–15 cm od kože. Počakajte 10-15 sekund in obliž odstranite. Pri neprepustnem obližu pršilo nanesite na rob obliža, po nekaj sekundah rob dvignite in postopek ponavljajte, dokler obliž ni popolnoma odstranjen. Opozorila: lahko povzroči alergijske kožne reakcije pri občutljivih osebah. Izjemno vnetljiv aerosol. Pri visoki temperaturi se lahko razpoči, ne izpostavljajte nad 50 °C. Zaščititi pred toploto, vročimi površinami, iskrami, odprtim ognjem in drugimi viri vžiga. Ne prebadajte ali ne žgite, niti po uporabi. Hraniti na hladnem. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati razpršila in zaščitite oči. Embalažo odstranite v zbiralniku za nevarne odpadke. Rok uporabnosti: Uporabiti najkasneje do datuma, navedenega na dnu. Sestava: heksametildisiloksan, butan, propan, izobutan, ciklopentasiloksan. Proizvajalec: AVEFLOR, d.o.o., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Češka, Uvoznik in distributer: AstraVita d.o.o., LJUBLJANA, www.astra-vita.eu, info@astra-vita.eu. Datum izdaje: 1.11.2023