

4.) Trioderm® Wart cryotherapy

Trioderm® za odstranjevanje majhnih kožnih bradavic s hitrim zamrzovanjem. Za domačo uporabo, nanos je preprost, hiter in varen. Primeren tudi za otroke, starejše od 4 let. Uporaba: da bi povečali učinkovitost bradavico zmečajte, tako da jo 5 minut namakate v vodi ali nanese na mokro blazinico. Gobico postavite s temnejšim koncem na plastično cev in jo vstavite v aplikator. Pritisnite aplikator 2 sekundi. Počakajte 20 sekund, da se goba nasiči in zamrzne. Držite podaljšek, potegnite ga iz aplikatorja in zamrznjeno gobo položite na sredino bradavice pustite delovati 10–40 sekund.

- 10 s za bradavice (razen na nogah) do 2,5 mm v premeru, - 15 s za bradavice (razen na nogah) do 5 mm v premeru, - 40 s za bradavice na nogah. Odstranite penasto gobo z bradavice in jo zavržete. Posamezno bradavico zdravite največ 3-krat skupaj, vsakič 2 tedna narazen. Izdelka ne pršite neposredno na bradavico ali na kožo in nanašajte na sluznice. Ne uporabljajte okoli oči, na ušesih, občutljivih delih telesa ali odprtih ranah! Ne uporabljajte razpršila na kožnih spremembah, glede katerih niste prepričani, da so bradavice. Ne uporabljajte, če ste alergični na katero od sestavin izdelka. Pred uporabo pri sladkornih bolnikih, ljudeh s cirkulacijskimi težavami, nosečnicah in doječih ženskah se posvetujte z zdravnikom. V primeru vztrajnih bolečin po zdravljenju bradavic s sprejem prenehajte uporabljati sprej in se posvetujte z zdravnikom. Opozorila: oči zaščitite in ne vdihavajte pršila. Izjemno vnetljiv aerosol. pri visoki temperaturi se lahko razpoči, ne izpostavljate nad 50 °C. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja ali drugih virov vžiga. Ne prebadajte ali kurite, niti po uporabi. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne jejte, ne pijte in ne kadite med uporabo pršila. Embalažo odstranite v zbiralniku za nevarne odpadke. Sestavine: Butan, propan, dimetil eter, izobutan. Proizvajalec: AVEFLOR, d.o.o., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Češka, Uvoznik in distributer: AstraVita d.o.o., LJUBLJANA, www.astra-vita.eu, info@astra-vita.eu. Datum izdaje: 1.11.2023