

ActiMaris® gel za rane, 20 g

Splošne informacije:

za dekontaminacijo, čiščenje in vlaženje akutnih in kroničnih ran na koži, sluznici in pri opeklinah prve in druge stopnje. Uporabljamo ga lahko tudi kot polnilo za rane.

1. Opis proizvoda:

ActiMaris gel vsebuje morsko sol, vodo in aktivni kisik.

Aktivni kisik odstranjuje patogene mikroorganizme, ki so tipični za rane, brez poškodovanja tkiva. Oksidativni efekt pa hkrati nevtralizira neprijeten vonj ran.

Alkalni pH dodatno podpira kontrolirano sproščanje aktivnega kisika s pomočjo hidroksilnih (OH) skupin (kot del kontroliranega redoks sistema). Morska sol vsebuje natrijev klorid kot glavno sestavino in več kot 80 drugih sestavin(kalij, kalcij, magnezij , žveplo, bromid, železo in esencialne sledove joda, cinka, mangana in selen). Tako kot v morski vodi so ti le elementi prisotni v fiziološko pravih koncentracijah, tako da vplivajo na celični milje in metabolizem ran.

Povečana slanost ActiMaris gela povzroča optimalni hiperozmotski efekt, tako da otekline hitro izginejo.

2. Področja uporabe:

Za čiščenje, zmanjševanje oteklina, vlaženje in dekontaminacijo

- akutnih mehanskih ran in post-operativnih ran
- kroničnih ran (dekubitusi, arterijske-venske razjede, diabetične razjede)
- termičnih in kemičnih ran (opekline prve in druge stopnje)
- vstopnih mest uroloških katetrov, cevok PEG in drenažnih cevok

ActiMaris gel je še posebej primeren za čiščenje fibrinskih plasti ali gnojnih, inficiranih ali močno smrdečih ran, hkrati pa ga uporabljamo kot polnilo pri globokih ranah.

3. Navodila za uporabo:

ActiMaris gel uporabljamo pri sobni temperaturi, če je potrebno ga pred uporabo ogrejemo na sobno temperaturo. Pred aplikacijo gela je potrebno rano očistiti z ActiMaris raztopino(sensitiv ali forte). Nato nanesemo nežno gel na ali v rano in pokrijemo z inertno kompresom, gazo ali podobnim materialom. Dolžino in pogostost nanašanja gela prilagajamo razmeram rane in nadaljujemo uporabo, dokler niso nekroze in obloge lahko odstranljive in rana izgleda čista. Odvisno od rane , menjavo obloge usklajujemo na indikacijo in faze na vsake 2 do 3 dni.

V primerih, ko je oblogo težko odstraniti, se priporoča, da namočite oblogo z ActiMaris raztopino (sensitiv ali forte) za vsaj 5 minut in nato oblogo nežno odstranite.

V primerih obsežnih fibrinskih ali nekrotičnih oblog se svetuje primarna kirurška odstranitev.

Za čiščenje ran lahko uporabimo ActiMaris gel v kombinaciji z inertnimi obvezilnimi materiali ali oblogami za rane.

4. Tkivna toleranca in bio-kompatibilnost

ActiMaris gel je primeren za dolgotrajno uporabo tudi za občutljivo, vzdraženo kožo ali sluznico. Ne povzroča draženja ali reakcij preobčutljivosti; zmanjša bolečine, ne zavira granulacije in epitelizacije; dermatološko varen.

5. Stranski učinki

Niso znani. Možno je le razbarvanje barvnih tkanin, če pridejo v stik z gelom ActiMaris®.

6. Kontraindikacije:

ActiMaris® gela ne uporabljajte v primeru alergije oz. suma na alergijo na katerokoli izmed njenih sestavin.

7. Omejitve uporabe:

Nosečnost in dojenje: Ni dokazov, da bi sestavine imele mutageni ali embrio toksični učinek, vendar pa je zaradi pomanjkanja študij pri ženskah med nosečnostjo in dojenjem, dovoljena uporaba gela za rane ActiMaris® le po presoji zdravnika.

Dojenčki in majhni otroci: pred uporabo gela za rane ActiMaris® pri dojenčkih in majhnih otrocih se posvetujte z zdravnikom.

8. Interakcije

ActiMaris gel deluje zaradi oksidacije aktivnih kisikovih sestavin.

V izogib možnih interakcij, gela ne uporabljamo v kombinaciji s substancami, ki vsebujejo srebro, bigvanid ,taurolidin ali jod vsebujoče raztopine in obloge. To upoštevamo tudi pri vlaženju takih oblog.

ActiMaris gel pa lahko kombiniramo s sterilnimi, neaktivnimi materiali, kot so obloge brez aktivne substance, gaze, blazinice, gobice, geli, hidro vlakna, alginati, hidrokoloidi in podobni materiali.

Aplikacija gela pa je seveda možna z vsemi drugimi ActiMaris proizvodi (raztopina sensitiv ali forte).

9. Splošna varnostna navodila:

Samo za zunanjo uporabo ranah na koži in sluznici . Ne uporabljajte za infuzije ali injekcije ali za uživanje. Uporabite le izdelke v brezhibni in nepoškodovani embalaži. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo. Medicinski pripomoček. Shranjujte izven dosega otrok.

10. Sestava / tehnične podrobnosti:

Aktivni kisik, prečiščena voda, morska sol, litijev magnezijev natrijev silikat

Čist, brezbarven, bazičen in hipertoničen gel s karakterističnim vonjem. Vsebuje 3 % NaCl(morsko sol) in 0,2 %NaOCl

11. Rok uporabe:

Izdelek je uporaben do navedenega datuma, če ga hranite na sobni temperaturi med +5° in + 25° C.

Zaščitite pred direktno sončno svetlobo !

Rok trajanja proizvoda je 30 mesecev. Datum uporabe do se nahaja na tubi in embalaži.

Uporabnost po prvem odprtju:

Po prvem odprtju tube lahko vsebino uporabljate 3 mesece. Tubo po vsaki uporabi dobro zaprite. Pred uporabo pretresite!