

**UVOD**

Izcedek iz nosu je razmeroma pogost pojav pri malčkih in dojenčkih. Ena največjih težav je, da malčki ne morejo izpihati nosu in da je potrebnega nekaj časa, da se malček ali dojenček nauči dihati skozi usta. Zamašen nos ovira dihanje, povzroča nelagodje in lahko povzroči resnejše zdravstvene težave v nosu, ušesih, grlu in dihalnih poteh. Zato je zelo pomembno, da ohranjamo nosno votlino čisto. Arianna® Baby-Vac je daleč najboljša alternativa za ta namen. Seveda ne more nadomestiti zdravniškega pregleda, saj lahko le zdravnik ugotovi vzrok. Odstranjevanje sluzi iz nosne votline pospeši celjenje, izboljša dihanje, splošno počutje in pomaga pri preprečevanju bolezni.

**Področje uporabe:**

Pripomoček je namenjen sesanju nosnih izločkov otrok! Ni ga mogoče uporabiti za druge namene!

**ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA** **Prva uporaba**

Pred uporabo pripomoček temeljito sperite z vročo vodo iz pipe.

Ne namakajte v dezinfekcijski vodi!

**Čiščenje**

Pripomoček očistite po vsaki uporabi, najbolje takoj. Operite v topli vodi iz pipe z detergentom in nato sperite.

**Metode dezinfekcije:**

Obrišite zunanjo površino sesalne glavnice (A) z vatirano blazinicco, navlaženo z etilnim alkoholom, ki je na voljo v lekarni, ali z mehko krpo. Sesalno glavnico lahko tudi postavite v vrelo vodo, tako da jo voda popolnoma prekrije, in kuhate 3 minute, ali pa jo postavite v posodo za mikrovalovno pečico in jo sterilizirate v 30–40 ml

vode pri 600–800 W 3 minute ter nato pustite, da se ohladi.

Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, kemikalij ali abrazivnih sredstev!

**OPOZORILO!**

- Pri hemofiliji, pogostih krvavitvah iz nosu se pred uporabo posvetujte z zdravnikom!
- Če se po uporabi pripomočka na nosu otroka pojavi alergijski izpuščaj ali rdečina, prenehajte z uporabo pripomočka in se posvetujte z zdravnikom!
- V primeru več otrok je priporočljivo, da za vsakega otroka uporabite ločeno sesalno glavnico in jih za shranjevanje označite, da preprečite ponovno okužbo. Če tega ni mogoče rešiti, kot je opisano zgoraj, pred uporabo temeljito očistite sesalno glavnico.
- Uporabite sesalnik z močjo v območju 800–1800 W. (Varna uporaba je potrjena z zapisi meritev.) Upoštevajte navodila za uporabo sesalnika!
- Baby-Vac ni igrača. Pripomoček naj uporablja odrasla oseba, potem ko prebere navodila!
- Pred vsako uporabo preverite celovitost delov.
- Pripomočka ne uporabljajte za druge namene kot za predvideno področje uporabe!
- Pripomočka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali manjka!
- **Ne namakajte v dezinfekcijski vodi!**

**SHRANJEVANJE:**

Pripomoček hranite v suhem okolju, stran od neposredne sončne svetlobe in sevalne toplote.


### **MONTAŽA:**

1. Namestite sesalno glavico (A) v zbiralni cilinder (B).
2. Vključite gospodinjski sesalnik.
3. Prikluček sesalnika (C) priključite na cev sesalnika.

A: Sesalna glavica

B: Zbiralni cilinder

C: Prikluček za sesalnik

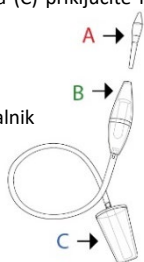

### **DELOVANJE:**

1. Pripomoček lahko učinkovito uporabljate v naravnem položaju telesa. Priporočamo, da odrasla oseba, ki uporablja pripomoček, otroka vzame v naročje ali posede majhnega otroka v naročje.
2. Sesalno glavo (A) namestite tako, da popolnoma zamaši eno nosnico, in jo držite nekaj sekund ter opazujte odvajanje sluzi iz sesalne glavice.
3. Ponovite zgornje korake na isti ali drugi nosnici.
4. Med 2. in 3. korakom lahko pripomoček nežno premikate, da pospešite postopek.
5. Čas sesanja nosu je pribl. 5 sekund na nosnico
6. Ko končate, izklopite sesalnik in očistite pripomoček, kot je opisano zgoraj.
7. Postopek ponovite 2- do 3-krat na dan ali po potrebi.

Življenjska doba pripomočka je 3 leta. Uporablja se lahko varno ob upoštevanju navodil za uporabo.

### **DEMONTAŽA IN ČIŠČENJE**

1. Odklopite priključek sesalnika (C) iz sesalnika.
2. Izklopite sesalnik.
3. Očistite pripomoček, kot je opisano zgoraj.
4. Pustite, da se posuši na zraku.

Arianna® Baby-Vac aspirator je testiran medicinski pripomoček. Njegov izbor materiala in oblika sta takšna, da je verjetnost neželenih učinkov zaradi alergij ali draženja manjša od 0,1 %.

Dodatne informacije o izdelku najdete na spletni strani [www.babyvac.eu](http://www.babyvac.eu)

Če doživite resen nepričakovan dogodek v zvezi s pripomočkom, o tem pisno obvestite proizvajalca na naslednji e-poštni naslov: [iroda@illescok.hu](mailto:iroda@illescok.hu).



**Ime in naslov proizvajalca:**

Illés Csók és Társa Kft.

Ajtósi Dürer sor 35.

Budapest H-1146

Madžarska

### **Uporabljeni simboli:**

	Medicinski pripomoček
	Ime in naslov proizvajalca
	Serijska številka
	Edinstven identifikator naprave
	Preberite uporabniški priročnik!
	Opozorilo pred nevarnostmi!
	Opozorilo!
	Prepoved
	Večkratna uporaba pri enem pacientu
	Hraniti zaščiten pred sončno svetlobo
vOX	Številka različice in datum odobritve
YYYYMMDD	trenutnih "Navodil za uporabo".