

Navodilo za uporabo: Silikonski zamašek Mack's zgnetemo v obliko kroglice in položimo na čisto uho. S palcem desne roke zamašek oblikujemo tako, da se zunanemu ušesu tesno prilega. Lasje ne smejo priti v kontakt s silikonom. Zamaška ne potiskamo v notranjost ušesne votline. Silikonski zamašek je prepovedano deliti na manjše kose. Silikonski zamašek je namenjen za večkratno uporabo. V primeru, da uporabnik ne upošteva navodil za uporabo, zamaški ne zagotavljajo primerne zaščite.