

VARNOSTNA SVETILKA ZA SPREHAJALNO PALICO



Svetilko kot dodatek lahko namestimo
na vse modele zložljivih palic TEHNOMAT



NAMESTITEV SVETILKE

Gumijasto zaporo potegnemo
okrog cevi in zatakneemo
za zapiralno na svetilki.



UPRAVLJANJE SVETILKE

S pritiskom na steklo prožimo
funkcije svetilke.



MENJAVA BATERIJE

1. Odstranimo gumijasto podlogo
2. Odstranimo prozoren pokrovček in baterijo
3. Zamenjamo baterijo CR2032.

DODATKI



gumijasta
kapa
10049



konica
kratka -
jeklena za
cilindrično
cevi
10019



tipalo z
navojem
za orientacijsko
belo palico
10070



2-K roč PP/pluta
z varnostno
vrvico za
sprehajalno
palico
10048



gumijasta podloga 10023

Družba Tehnomat daje za vse modele teleskopskih palic za napake v materialu ali pri montaži dve leti garancije. Rezervne dele zagotavljamo še 6 let po nakupu. Servisiranje palic se izvaja na sedežu družbe oziroma v servisnih centrih. Ob reklamaciji priložite račun.

VAŠ SERVISER:

KRANJ: TEHNOMAT d.o.o., Jezerska 55, Tel.: 04/235 18 10 • **LJUBLJANA:** Trgovina PETER SPORT, Vojkova 77, tel. 01/565 30 30 • **KAMNIK:** ŠPICA SPORT, Prodaja in servis športne opreme, Ljubljanska cesta 4a, Tel.: 01/831 06 56, GSM: 041 704 965 • **ŠKOFJA LOKA:** BOKAL SPORT, Mestni trg 20, Tel.: 04/512 51 13 • **BEGUNJE:** Sportna prodajalna ELAN, servis smuči in koles, Begunje 1, Tel.: 04/535 15 32 • **KOBARID:** Trgovina SPORTLAND, Gregorčičeva 17, Tel.: 05/388 53 81 • **AJDOVŠČINA:** Trgovina KOBRA SPORT, Župančičeva 8, Tel.: 05/366 34 95 • **IDRIJA:** Trgovina PSC-VELO CENTER, Sv. Barbare 3, Tel.: 05/373 40 44 • **LOGATEC:** Uroš Semrov s.p., Kalce 17 b, GSM.: 031/210 211 • **POSTOJNA:** Trgovina INOCENTE, Notranjska 4, Tel.: 05/726 40 70 • **CERKNICA:** Trgovina MARTIN KRAPAN, IC Podskrajnik, Tel.: 01/709 39 58 • **RIBNICA:** TRIM SPORT, Hrovača 14a, Tel.: 01/837 30 26 • **ČRNOMELJ:** Trgovina L-SPORT, Kolodvorska 13, Tel.: 07/305 24 81 • **MARIBOR:** Trgovina SB SHOP, Pohorska ul. 60, Tel.: 070/825 843 • **RAVNE NA KOROŠKEM:** Trgovina MOJCA SPORT, Na Saneh 2, Tel.: 041/364 448 • **LITIJA:** Kolesarski servis, Tenetiše 7a, Tel.: 01/898 50 18 • **TRBOVLJE:** GÖLTES, Savinjska cesta 35, Tel.: 03/563 30 30 • **MURSKA SOBOTA:** Trgovina GAJO SPORT-STIL, Lendavska 31, tel: 02/530 06 83

www.tehnomat.si



MODEL



**NASTAVLJIVE
SPREHAJALNE IN
ORIENTACIJSKE PALICE**

TEHNOMAT
IZDELANO V SLOVENIJI

PROIZVAJA IN SERVISIRA:
Tehnomat, Kranj, d.o.o., Jezerska cesta 55, 4000 Kranj
Telefon: (04) 235 18 10, Faks: (04) 235 18 11, Gsm: (031) 495 499
e-pošta: info@tehnomat.si • www.tehnomat.si

PROTIZDRSNA PETA

- enostavna in lahka namestitev in snemanje
- namenjene za zunanjo uporabo
- vgrajene trdokovinske konice
- gumijast okvir, odporen proti zmrzali
- usnjen jermen
- 3M odsevni trak

VELIKOSTI:

S (32-36), M (37-39),
L (40-44), XL (45-50)



oblikovanje: ABALUMA, 10 / 2015



MODEL 20

2-delna palica • 70 - 115 cm • jeklena konica • gumijasta podloga • 2-K roč PP/pluta • varnostna vrvica • možnost menjave konic

MODEL 23

2-delna palica • 67 - 108 cm • gumijasta kapa • 2-K roč PP/pluta • varnostna vrvica

MODEL 25

3-delna palica • 55 - 105 cm • jeklena konica • gumijasta podloga • 2-K roč PP/pluta • varnostna vrvica • možnost menjave konic

MODEL 27

2-delna palica • 70 - 115 cm • jeklena konica • gumijasta podloga • 2-K roč PP/pluta • varnostna vrvica • odsevni trakovi • možnost menjave konic

MODEL 28

2-delna palica • 67 - 108 cm • gumijasta kapa • 2-K roč PP/pluta • varnostna vrvica • odsevni trakovi

MODEL 19

Orientacijska bela palica • 2-delna • 91 - 130 cm • tipalo iz trdega poliamida s steklenimi vlakni • gumijasti roč • varnostna vrvica • odsevni trakovi • možnost menjave tipala

MODEL 22

Sprehajalna bela palica • 2-delna • 70 - 115 cm • jeklena konica • gumijasta podloga • 2-K roč PP/pluta • varnostna vrvica • odsevni trakovi • možnost menjave konic

Navodila za uporabo sprehajalnih palic

1. korak – nastavljanje dolžine:

Trodalna palica (MODEL 25): spodnji del palice izvlecite do zelene dolžine, vendar največ do oznake STOP. Enako ponovite še s srednjim delom palice.

Pozor: pri trodelni palici morata biti oba dela izvlečena enakomerno.



Dvodelna palica (MODEL 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28): spodnji del palice izvlecite do zelene dolžine, vendar največ do oznake STOP.



2. korak – kako nastaviti ustrezno višino sprehajalne palice:

Ustrezna višina sprehajalne palice je takrat, ko vam vrh roča palice, ob pokončni drži in spuščeni rok, sega do vrha zapestja.



Vsebina in oblika navodil sta last družbe Tehnomat, Kranj, d.o.o. Kopiranje delov ali celote je prepovedano.

3. korak – utrjevanje nastavljene dolžine:

Na izbrani višini palico zavrtite **v smeri urinega kazalca**, da se učvrsti. Pri pravilni učvrstitvi palice se le ta lahko obremeni do 85 kg.



4. korak – popuščanje in zlaganje:

Trodalna palica (MODEL 25): Spodnji del palice zavrtite **v nasprotni smeri urinega kazalca** in jo potisnite v srednji del. Isti postopek ponovite z zgornjim delom palice.

Dvodelna palica (MODEL 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28): Spodnji del palice zavrtite **v nasprotni smeri urinega kazalca** in jo potisnite v srednji del.

Pravilna uporaba:

Palico nosite v roki, nasproti boleče noge. Naprimer, če ste si poškodovali desni gleženj, vzemite palico v levo roko.

Varnostna vrvica:

Roč palice primite tako, da vstavite roko skozi vrvico, kakor vam prikazuje slika na prvi strani. Z regulacijo drsnika si prilagodite velikost zanke tako, da vam ob izpustu roča palica ne pade iz rok, temveč vam obvisi na roki.

OPOZORILO:

Med reguliranjem z eno roko palico čvrsto držite, z drugo pa utrdite izbrano višino. Palic se **ne sme mazati** z WD 40, oljem ali mastjo. Bodite pozorni pri uporabi kreme za sončenje, da z mastnimi rokami ne otipavate cevi. Mokre palice razstavite na segmente, obrišite s suho krpo in jih razstavljene pustite čez noč, da se na zraku osušijo.

POMEMBNO: Ko so palice zložene, jih ne privijajte, sicer jih ne bo mogoče odviti.

www.tehnomat.si