

Obvestilo

1. ARTIKEL: Podaljšek za ustnik za dajanje zdravil (šifra standarda 1342)
OptiChamber Diamond z ustnikom, proizvajalec: PHILIPS



2. ARTIKEL: Nastavek z masko za dajanje zdravil (šifra standarda 1341)
OptiChamber Diamond z masko in ustnikom, proizvajalec: PHILIPS



Nasvet: Nastavek z masko za dajanje zdravil je mogoče uporabiti tudi samo z ustnikom. Enostavno odstranite masko, saj je ustnik del osnovne komore.

Cena: priporočena maloprodajna cena je v standardu ZZS, brez doplačila.

1. **OZNAČBA USTNIKA IN VELIKOSTI MASK (PRI NASTAVKIH S PRILOŽENO MASKO):** pri določanju prave velikosti maske vas prosimo, da **upoštevate** otrokovo starost in dejansko velikost obraza.

Nastavek:	USTNIK	MASKA, velikost S	MASKA, velikost M	MASKA, velikost L
Starost	neomejeno	Od 0 do 1,5 let	Od 1 do 5 let	Nad 5 let
Barva	bela	oranžna	rumena	modra
NENSI šifra	1048802	1034357	1034356	1035456

2. **NOVA KOMORA** – je manjša in bolj praktična. Narejena iz ANTISTATIČNEGA MATERIALA, ki omogoča da se zdravilo zadrži v komori dlje časa (rezultat je bolj učinkovita inhalacija).
3. **NOVA MASKA** - omogoča popolno zatesnitev in prijeten občutek med inhaliranjem.
4. **INDIKATOR PRAVILNEGA INHALIRANJA ZDRAVILA** - loputa, ki se dvigne, ko uporabnik izdihne. Tako lahko npr. starši lažje vedo ali otrok pravilno inhalira.
5. **VGRAJENA PIŠČALKA** - v primeru nepravilnega vdihovanja (preplitko ali sunkovito) se oglasi piščalka, ki opozori, da mora uporabnik spremeniti način vdiha.
6. **OPRAVLJENE KLINIČNE ŠTUDIJE** s katerimi so bile preverjene in dokazane prednosti artikla pred tovrstnimi artikli na trgu.

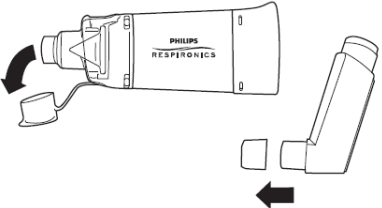
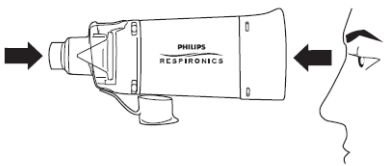
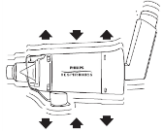
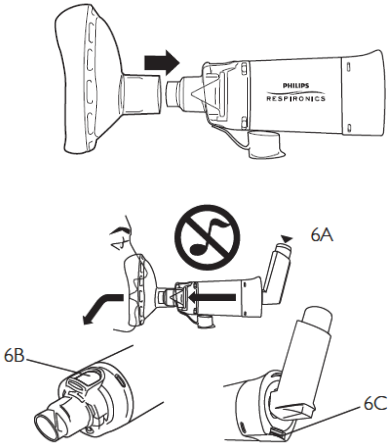
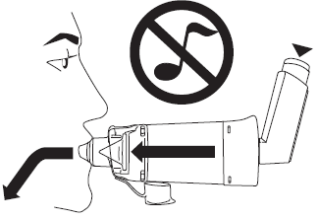
Zaradi naštetih izboljšav je **OptiChamber Diamond** ta trenutek **najboljši izdelek na tržišču**, kar dokazuje študija: **A guide to Aerosol Delivery devices for respiratory therapist, 3rd edition**, avtor: American association for respiratory care.



Antistatični nastavek za dajanje zdravil

Optichamber Diamond

Navodila za uporabo in čiščenje:

	<p>1. Pripomoček je namenjen samo za osebno rabo. Pripomoček lahko uporabljate takoj, ko ga vzamete iz embalaže. Pred uporabo preberite navodila za uporabo pršilnika. Vedno upoštevajte tudi zdravnikova navodila. Odstranite pokrovček z inhalatorja pMDI in ustnika.</p>
	<p>2. Pred uporabo preglejte, ali je pripomoček poškodovan in ali mu manjkajo deli. S pripomočka in maske, če jo uporabljate, odstranite tujke ali umazanijo. Pripomočka ne uporabljajte, če je poškodovan ali mu manjkajo deli.</p>
	<p>3. Pršilnik vstavite v prilagodljivo odprtino podaljška, da je trdno nameščen, nato pa ga pretresite skladno z navodili.</p>
	<p>4. A V kolikor uporabljate OptiChamber Diamond z masko: Pri uporabi pripomočka OptiChamber Diamond z masko LiteTouch namestite masko na konec ustnika in jo nežno obračajte, dokler se ne prilega. Nato jo pritisnite na obraz in pridržite, da jo zatesnite. Takoj zatem aktivirajte pršilnik. Otrok naj počasi diha z normalno hitrostjo dihanja. Po 10 sek. odmaknite obrazno masko. Če vam je zdravnik predpisal dodatne odmerke, ponavljajte postopek po zgornjih navodilih. V kolikor zaslišite alarm, ki opozarja, da je hitrost vdiha prehitra, upočasnite vdih. (6A) Med uporabo ne pokrivajte ventila za izdihavanje. (6B) Med uporabo ne ovirajte alarma za visoko hitrost vdihavanja. (6C)</p>
	<p>4. B V kolikor uporabljate OptiChamber Diamond z ustnikom: Z ustnicami dobro zatesnite ustnik. Počasi izdihnite do maksimalnega izdiha. Takoj zatem aktivirajte pršilnik in začnite s počasnim in globokim vdihom. Vdih naj pri malih otrocih traja 3-4 sekunde, pri šolarjih in mladostnikih 5-6 sekunde. V kolikor zaslišite alarm, ki opozarja, da je hitrost vdiha prehitra, upočasnite vdih. Nato zadržite dih za 10 sekund ali kot vam naroči zdravstveni delavec, ter nato izdihnite čez nos.</p>
<p>Navodila za čiščenje: Priporočamo, da pripomoček enkrat na teden operete. Pripomoček razstavite ter ga 1 minuto mešajte v topli milnici s tekočim detergentom. Pustite, da se deli vsaj 10 minut namakajo. Masko je potrebno oprati pod tekočo vodo ali namakati 10 minut. Nato pripomoček in masko sperite s čisto in toplo tekočo vodo in ju otresite. Vsi deli naj se osušijo na zraku, nato pripomoček spet sestavite.</p>	

