



Pain

CANNASEN® Pain & Arthritis Gel

[različica 1.3/maj 2024]

SLO: Navodila za uporabo gela proti bolečinam in artritisu CANNASEN® Pain & Arthritis Gel

Pred uporabo gela CANNASEN® Pain & Arthritis Gel natančno preberite ta navodila za uporabo.

Gel CANNASEN® Pain & Arthritis Gel je registriran medicinski pripomoček. Učinkovitost in varnost sta bili preizkušeni v skladu z Evropsko direktivo o medicinskih pripomočkih (93/42/EGS).

KAJ JE GEL CANNASEN® PAIN & ARTHRITIS GEL?

Gel CANNASEN® Pain & Arthritis Gel je formula za lokalno uporabo v obliki gela, ki pomaga lajšati bolečine in otekanje sklepov. Gel nudi hladilni učinek, ki ublaži „vroč“ ali topel občutek in bolečino v sklepih.

KAKO DELUJE GEL CANNASEN® PAIN & ARTHRITIS GEL?

Ko gel nanesete na kožo, mešanica alkohola in vode hitro izhlapi, kar povzroči prevodno hlajenje in učinek lajšanja bolečin.

NAMEN UPORABE

Za lajšanje bolečin in otekanja sklepov.

PREDNOSTI UPORABE

Lajšanje bolečine, zmanjšanje otekline, hladilni učinek.

PODROČJE UPORABE

Nanesite od zunaj na prizadete dele telesa, kot so prsti, zapestja, komolci, ramena, vrat, hrbet, kolena ali gležnji.

NAVODILA ZA ODMERJANJE IN TRAJANJE UPORABE

Priporočeno odmerjanje: Na roko, zapestje ali komolec nanesite 0,25 g velikosti graha, na stopalo, gleženj ali koleno pa 0,5 g velikosti dveh grahov. Pogostost in trajanje uporabe: Gel lahko uporabljate večkrat na dan. Izdelek je namenjen začasni uporabi.

SESTAVINE

Aktivne sestavine: Mešanica alkohola in vode. Druge sestavine: Mentol, raztopina natrijevega hidroksida, kanabidiol (CBD), akrilatni križolimer, izopropil miristat, kafra, fitinska kislina. Brez konzervansov in barvil.

OBLIKA ODMERKA IN VSEBINA

Originalna embalaža s 50 ml gela.

SPOŠNI NAPOTKI GLEDE PREVIDNOSTI

- Izogibajte se stiku z očmi ali nosno sluznico. Gela ne jemljite peroralno.
- Izdelek hranite zunaj dosega majhnih otrok in hišnih živali.
- Izdelek ni priporočljiv za otroke, mlajše od 14 let, razen po posvetu z zdravnikom.



CANNASEN® Pain & Arthritis Gel

[različica 1.3/maj 2024]

SLO: Navodila za uporabo gela proti bolečinam in artritisu CANNASEN® Pain & Arthritis Gel

- Med nosečnostjo ali dojenjem izdelek uporabljajte le po posvetu z zdravnikom.
- Izdelka ne uporabljajte na poškodovani ali poškodovani koži.
- Po uporabi izdelka si temeljito umijte roke.
- Če pride do poslabšanja stanja, se posvetujte z zdravnikom.

INTERAKCIJE

Gela ne uporabljajte na površini kože hkrati z drugimi izdelki za lokalno uporabo. Da bi se izognili interakcijam z zdravili, uporabljajte zdravila v razmaku dveh ur, ali se posvetujte z zdravnikom.

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti (alergije) na katero koli sestavino.

SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladnem (med 10 °C in 25 °C) in pred svetlobo zaščitenu prostor.

OPOMBE IN INFORMACIJE O ROKU UPORABE MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA

Gel lahko uporabljate le do datuma uporabe, ne pa tudi po njem. Po odprtju ga porabite v 90 dneh, nato ga zavržite. Majhne spremembe barve ne vplivajo na učinkovitost izdelka.

ODLAGANJE

Izdelek lahko odvržete med gospodinjske odpadke.

POROČANJE O INCIDENTIH

Če je ta izdelek povezan z resnim incidentom (smrt bolnika, uporabnika ali druge osebe; začasno ali trajno resno poslabšanje zdravstvenega stanja bolnika, uporabnika ali druge osebe; resno tveganje za javno zdravje), je treba o tem incidentu obvestiti proizvajalca in pristojne nacionalne organe.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Gel CANNASEN® Pain & Arthritis Gel je izdelek, enostaven za uporabo, ki prijetno hladi in prinaša olajšanje bolečim, pregretim in oteklim sklepom.

DISTRIBUTER

NaturaMedica d.o.o., Novi dom 33b, SI-1420 Trbovlje, tel.: 035630022

Pomen simbolov na pakiranju:


Proizvajalec
CANNORDIC A/S
Indiakaj 10
2100 Kopenhagen
Danska


Simbol CE


Temperaturno
območje


Uporabno
do konca


Preberite
navodilo
za uporabo


Številka
serije/lot


Zaščitite
pred
sončno
svetlobo


Ne uporabljajte,
če je tuba
poškodovana


Hranite
na suhem


Izdelka ne
uporabljajte
ponovno