

## Navodila za uporabo LimbO zaščite



Slika 1

### Namestitev

S palcem in kazalcem previdno primite črno tesnilo na robu, kjer se stika s prozorno plastično zaščito LimbO-a (kot kaže slika) in nežno potisnite poškodovano okončino v zaščito. Opomba: pri modelih za noge naj bodo prsti obrnjeni proti koničastemu koncu zaščite.

Še vedno držite LimbO zaščito kot je prikazano, potegnite jo čez mavce ali povoj tako, da je črno tesnilo obrnjeno navznoter - kot prikazano na sliki 1.

Ko je tesnilo nad kolenom ali komolcem, v najvišjem možnem položaju, povlecite zaščito rahlo navzdol tako, da se tesnilo obrne navzgor in se oprime kože nad mavcem ali povojem. Nato poizkusite potegniti LimbO zaščito v najvišji možni položaj. Na sliki 2 je prikazana pravilno nameščena LimbO zaščita.



Slika 2

Prepričajte se, da je tesnilo brez gub in pazite, da ne poškodujete LimbO zaščite z nohti ali nakitom.

Pri LimbO modelih za noge je pomembno, da pred namestitvijo spodnji del mavca zaščitite z nogavico ali mehko krpo in tako preprečite poškodbe LimbO zaščite.

Odsvetujemo hojo po tleh z nameščeno LimbO zaščito.

### Uporaba


Priporočljivo je, da poizkusite iz LimbO zaščite odstraniti čim več zraka, s čimer boste preprečili napihnjenost oziroma plovnost zaščite pri kopanju. To naredimo tako, da tesnilo previdno privzdignemo takrat, ko ni v vodi in iz LimbO zaščite iztisnemo zrak, nato pa pustimo, da se tesnilo ponovno prileže koži.

LimbO zaščite se ne sme nositi dlje kot 20 minut, saj se ujeti zrak segreje in lahko povzroči potenje in neugodje za uporabnika.

Pazite, da vam pri vstopu in izstopu iz kadi ali tuš kabine ne spodrsne.

## Odstranjevanje

Previdno obrnite tesnilo navzven in ga povlecite navzdol kot je to prikazano na sliki 3. S tesnilom ravnajte previdno, da preprečite trganje oziroma preluknjanje z nohti.

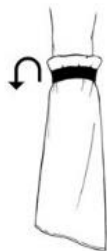

*Slika 3*

## Po uporabi

- Ročno operite zaščito, lahko uporabite blago razkužilo
- Obesite zaščito od spodaj navzgor, da se pred shranjevanjem posuši
- Zaščite ne zlagajte
- Pred ponovno uporabo preverite, če ni tesnilo poškodovano

## Opombe

- za varnost in maksimalno vzdržljivost zaščite LimbO upoštevajte zgoraj navedena navodila;
- izdelek lahko tudi potopite, na primer pri hidroterapiji, če je ta del vaše medicinske oskrbe, seveda s predhodno odobritvijo zdravnika;
- splošni zdravstveni nasvet je, da se v procesu zdravljenja izogibate plavanju in podobnih živahnih vodnih aktivnostih (npr tobogani itd), če ste v dvomih se morate posvetovati z zdravnikom;
- Limbo je ne sterilen izdelek, in zato ga ne smete uporabljati na odprtih ali nezaščiteneh ranah; je brez lateksa, za večkratno uporabo in zasnovan tako, da je uporaben šest do osem tednov, lahko tudi več, kar je odvisno od načina uporabe in vzdrževanja;
- v kolikor uporabljate LimbO zaščito v času medicinske oskrbe, se posvetujte z zdravnikom;