

STERIMAR™ ALERGIJA STOP & PROTECT

Terapija na osnovi naravnih sestavin

NE POVZROČA ZASPANOSTI IN NE ZMANJŠA KOGNITIVNIH FUNKCIJ.

Medicinski pripomoček - Nazalna pršilka z nepovratnim ventilom

SESTAVA: raztopina 100% naravne morske vode, obogatena s solmi mangana in kalcija in s patentiranim kompleksom iz natrijevega hialuronata (naravnega izvora). • Brez konzervansov. • Hitro in učinkovito zmanjša simptome alergije takoj po uporabi. **Znanstveno dokazana učinkovitost.** •

NETO KOLIČINA: 20 ml • **NAMEN UPORABE:** za nazalno uporabo. Začnite z uporabo pršila že ob prvih znakih alergije. • **NAČIN UPORABE:** 2-krat na kratko razpršite raztopino v vsako nosnico.

Uporabljajte 2 do 6 krat na dan vsaj 6 dni, ali dokler simptomi vztrajajo. Primerno za otroke od 3. leta starosti, nosečnice, doječe matere in odrasle. **Odmaši nos. Zmanjša izcedek iz nosu ter hitro olajša kihanje in srbenje.** Uporaba se odsvetuje v primeru preobčutljivosti na katerokoli sestavino raztopine. • **SHRANJEVANJE:** pri sobni temperaturi do 25°C. Hranite zunaj dosega otrok. • **Rok uporabe:** naveden na embalaži.

Proizvajalec: SOFIBEL - Laboratoire Fumoze, 110-114, rue Victor Hugo, 92686 Levallois Perret Cedex, Francija. **Distributer:** ARS PHRAMAE, d.o.o., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana tel.: 01/4205730 , www.arspharmae.com