

NO•DOL

OBLIŽI

5 OBLIŽEV Z AKTIVNIMI UČINKOVINAMI

Direktna naravna pomoč za ukrepanje ob bolečinah v sklepih, mišicah, hrbtu in vratu.


NODOL Obliši so enostavna in praktična pomoč pri vnetjih, poškodbah, preobremenitvah in bolečinah (revmatične bolečine, bolečine v mišicah, športne poškodbe, bolečine v križu). Naravne učinkovine arnike, kafe, vražjega kremplja, bele vrbe, žvepla in sivke okrepijo krvni obtok, pospešijo obnovo tkiv in zaradi svojih vlažilnih lastnosti omogočajo lažjo, nebolečo odstranitev obliža brez neprijetnih draženj. Zaradi inovativne sestave **NO•DOL** Obliši delujejo 24 ur.

BREZ BARVIL, BREZ KONZERVANSOV, NE MASTI IN NE PUŠČA MADEŽEV.
MEDICINSKI PRIPOMOČEK.


Navodila za uporabo:



1. Pretrgajte in odprite vrečko vzdolž oznake ter vzemite obliž.

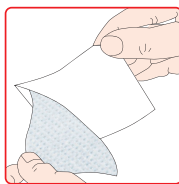

2. Odstranite zaščitno prozorno folijo.

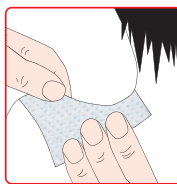

3. Obliž nalepite na želeno mesto.



4. Vrečko s preostalimi obliži dobro zaprite.

Obliž pustite delovati 24 ur, nato ga zamenjajte z novim.
Če potrebujete manjšo velikost, lahko obliž obrežete s škarjami.

OPOZORILO: Samo za zunanjo uporabo. Uporaba samo na nepoškodovani koži, ki naj bo čista in suha. Hranite izven dosega otrok. Pozorno preberite navodila za uporabo. Prenehajte z uporabo v primeru draženja kože oz. preobčutljivosti na izdelek. Uporabnost in varnost izdelka sta zagotovljena z ovojnico.

 Kosmeo Srl
Via Borromeo 29
20811 Cesano Maderno (MB)



Formulacija in distribucija:

ESI s.p.a.
 Italija
Zastopnik:
Sanofarm d.o.o.
Industrijska cesta 6r
6310 Izola
www.sanofarm.si



NO•DOL 5 OBLIŽEV
8008843007738
ESI s.p.a.