

STERIMAR™ IZOTONIČNA* RAZTOPINA

medicinski pripomoček

Raztopina morske vode za vsakodnevno higieno nosu otrok in odraslih

Sestava v 100 ml raztopine: morska voda = 31,82 ml (morska voda je naravno bogata z minerali in oligoelementi, ki imajo ugoden vpliv na nosno sluznico), prečiščena voda. 100% naravno in brez konzervansov.

Namen uporabe: izotonična* raztopina morske vode v pršilu za vsakodnevno vlaženje in higieno nosu dojenčkov od 6. meseca dalje, otroke in odrasle.

Način uporabe: pred prvo uporabo odstranite in nežno stisnite nosni aplikator, da se pršilo pripravi za uporabo. Razpršite v vsako nosnico 2-6 krat na dan, po potrebi tudi pogosteje.

Shranjevanje: pri sobni temperaturi do 25°C. **Rok uporabe:** naveden na embalaži in dnu vsebnika.

Opozorilo: zunanji vsebnik je napolnjen z inertnim plinom (dušikom), ki ne prihaja v stik z morskovo vodo. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hranite ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna. Zaščitite pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturi nad 50°C/122°F. Hranite zunaj dosega otrok.

* Izotonična raztopina vsebujejo podobno koncentracijo soli kot celice človeškega telesa.

Neto količina: 100 ml

Proizvajalec: Sofibel Laboratoire Fumoze, 110-114, rue Victor Hugo, 92686 Levallois Perret, Francija

Distributer: Ars Phramae, d.o.o., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, tel.: 01/4205730
www.arspharmae.com